

Produktbezeichnung

EasyDiagnosis COVID-19 Antigen Speicheltest

Art.-Nr.

10016

Einheit

20 Tests pro Packung

Lagertemperatur

2-30 °C

Probenart

Speichel

Test Ort

Point of Care (ohne Gerät)

Test Type

Qualitativ

Auslesezeit

15 Minuten

Sensitivität

96,09%

Spezifität

99.06%

BfArM Test-ID

AT430/20



HansaGT Medical GmbH
Tochtergesellschaft der Deutsche
HansaGT GmbH

Hardenstr. 51 • 20539 Hamburg
USt-ID Nr. DE 315274646
Steuer-Nr.: 46/714/04314
Handelsregister HRB 148912

Bankverbindung (DE)
IBAN: DE86 3002 0900 5360 5056 47
BIC CMCIDEDO
Targobank Hamburg

Tel: +49 (0)40 309 392 58
Fax: +49 (0)40 309 392 56
www.hansagt.de
www.hansagt24.com
bestellung@hansagt24.com

VORTEILE

Einfache Probenahme **1**

BfArM gelistet und somit erstattungsfähig **2**

Zuverlässige und hochpräzise Ergebnisse
nach 15 Minuten **3**

Aufbewahrung bei Raumtemperatur **4**

LIEFERUMFANG

20 Testkassette
20 Trockenmittel
20 Extraktionsreagenzien
20 Speichelsammler
20 Speicheltropfer
20 Extraktionsröhrchen
1 Röhrchenständer
1 Gebrauchsanweisung

EASYDIAGNOSIS COVID-19 ANTIGEN SPEICHELTEST




HansaGT Medical GmbH
Tochtergesellschaft der Deutsche HansaGT GmbH

TESTVERFAHREN

- 1 Spucken Sie genügend Speichel in den Sammelbeutel.
- 2 Stellen Sie das Extraktionsröhrchen auf den Ständer.
Drücken Sie 6 Tropfen Extraktionsreagenzien in das Extraktionsröhrchen.
- 3 Geben Sie mit einem Speicheltrofer 2 Tropfen Speichel in das Extraktionsröhrchen.
- 4 Schütteln Sie das Extraktionsröhrchen kräftig, damit sich der Speichel gut mit dem Extraktionsreagenzien vermischt.
- 5 Übertragen Sie 3 Tropfen der verarbeiteten Probe vertikal in die Probenvertiefung.
- 6 Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 15 Minuten ab.

TESTERGEBNIS

- 1 Zwei Linien sind vorhanden.
Eine farbige Linie sollte sich im Bereich der Kontrolllinie (C) befinden.
Eine farbige Linie erscheint im Bereich der Testlinie (T).
- 2 Nur eine farbige Kontrolllinie ist vorhanden.
Negative Ergebnisse sind präsumptiv.
- 3 Die Kontrolllinie erscheint nicht.

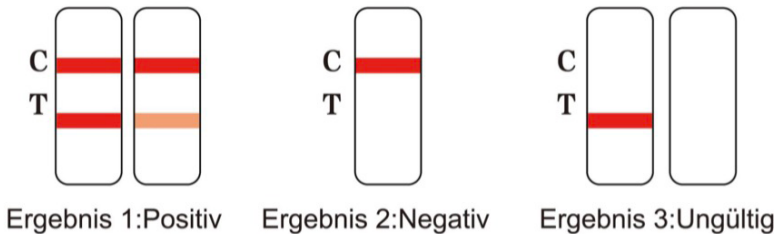

KLINISCHE BEWERTUNG

Auswertung Reagenz	bestätigt	ausgeschlossen	Summe
Positiv	123	4	127
Negativ	5	423	428
Summe	128	427	555

HansaGT Medical GmbH
 Tochtergesellschaft der Deutsche
 HansaGT GmbH

Hardenstr. 51 • 20539 Hamburg
 USt-ID Nr. DE 315274646
 Steuer-Nr.: 46/714/04314
 Handelsregister HRB 148912

Bankverbindung (DE)
 IBAN: DE86 3002 0900 5360 5056 47
 BIC CMCIDEDO
 Targobank Hamburg

Tel: +40 (0)40 309 392 58
 Fax: +49 (0)40 309 392 56
 www.hansagt.de
 bestellung@hansagt24.com